

Косметологический комбайн для лица и тела — 8D Micros

Руководство по эксплуатации



kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru
kosmetologicheskoe-oborudovanie.py

3. Внешний вид манипул устройства



4. Использование манипул устройства

Скраббер



Работа: нажать на кнопку здесь



Отрегулировать интенсивность здесь



Затем нажать на дно скраббера, после чего он начнет работу.

Свойства:

Скраббер устраняет отмершие клетки кожи, разглаживает морщины, лечит угревую сыпь и улучшает цвет лица. Он использует ультразвуковые волны для стряхивания отмерших клеток кожи, а также создает тепло и вибрации для проведения приятного массажа, в ходе которого в кожу проникают крема и содержимое ампул.

Рекомендованное время работы: 5-6 минут

Результат: глубокая очистка кожи, отбеливание/омоложение кожи, устранение морщин, улучшение циркуляции крови, улучшение лимфотока.

Манипула вакуум спрей



Рекомендованное время работы: 5-10 минут

Рекомендованная энергия на выходе: уровень 4 - 7





Манипула электропорации

Способ установки ампулы:



При работе с микротоками пользователь должен использовать контактные манипулы.

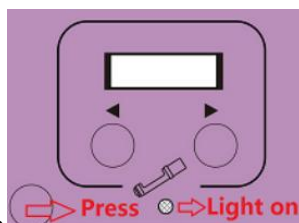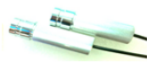

Работа: нажать на кнопку для выбора здесь

Работа: нажать на кнопку для запуска функции



Примечание:

При использовании вакуумного захвата для алмазной микродермабразии необходимо обеспечить контакт фильтра вакуумного соединителя прибора с насадкой.

Результат: устранение акне, комедонов.

5. Внешний вид аппарата:



6. Технические параметры:

Напряжение	110-220 В/50-60 Гц
Мощность	≤750 Вт
Материалы	АБС-пластик
RF лифтинг	Частота: 0,3-0,5 МГц
Скраббер	Вибрация: 270 000 раз в секунду
Плотность энергии RF	5-50 Дж/см ³

Электропорация	2,5-5 кГц 36 В 10-30 мА
Микротоки	2,5-5 кГц 36 В 10-30 мА
Вакуумный захват	Давление: ≥ 800 кПа (0,8 Пам)
Вакуум спрей	Литров в минуту: $\geq 4,8$ л/м
Шум	$\ll 40$ дБ

7. Меры предосторожности

1. Не применять при раневых дефектах кожного покрова.
2. Сильное покраснение может привести к образованию сосудистых звездочек.
3. Процедура противопоказана пациентам с сердечнососудистыми заболеваниями (например, аритмией), в частности, имеющим кардиостимулятор.
4. Процедура противопоказана пациентам с травмами или воспалением глаз.
5. При проведении процедуры необходимо снять контактные линзы.
6. Процедура противопоказана беременным.
7. Процедура противопоказана большинству пациентов после хирургических операций, а также пациентам с сахарным диабетом.
8. Процедура противопоказана пациентам с металлическими предметами в теле.